



MLRP MLRP MONOCLE

För tunnelseende



FÖRSTORING:
0.5X

ÖPPNINGSVINKEL:
54°

KORREKTIONSOMFÅNG:
± 8 – 4 dioptrier

VIKT:
4 gram

Personer som har ett förminskat synfält blir inte hjälpta av att det de tittar på blir förstorat. De behöver snarare ett hjälpmedel som förminskar, ungefär på samma sätt som en dörrkikare. Finessen är att synfältet då också vidgas och kan kompensera för det synfältsbortfall som en person med till exempel Retinitis pigmentosa har.

ML RP & ML RP Monocle är just sådana synfältsutvidgande system.

MLRP MONOCLE

För tunnelseende och vid behov av vidare perspektiv

En monokel som ger ett bredare synfält. Används framför allt för orientering. Enkel att ta med i fickan.



 **MULTILENS**
OPTICAL SOLUTIONS



› SYSTEMET


ML Rp är ett bakvänt Galilei-system med en förstoring på 0.5X.

› ENKEL ATT MONTERA

Systemet är mycket enkelt att montera i en båge. Det används bäst som Bi-system med placering ovanför eller under den normala blickriktningen.

› KORREKTION

Korrektion kan slipas in i systemet. Även filter kan fås i systemet.

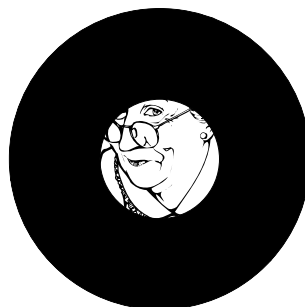

MLRP MONOCLE

› TILL HANDS BARA NÄR DEN BEHÖVS

ML RP Monocle bärs i ett snöre kring halsen (eller i fickan). När man behöver ett bredare synfält, använder man monokeln för titta på objektet genom den. Monokeln förminskar objektet och gör det möjligt för patienten att se det, trots sitt reducerade synfält.

› ENKEL ATT FÖRSKRIVA

ML RP Monocle är en standardlagervara. Den finns i en styrka och man behöver därför inte ha olika versioner i lager. Den är dessutom ett enkelt verktyg för patienten att testa. Eventuell korrektion ska slipas in i bärarens glasögon och inte i monokeln.

› HÖGBRYTANDE PLASTMATERIAL

Linsen är tillverkad av högbrytande plastmaterial inklusive ML Prima. Standardstyrkan på linsen är -7, men styrkan på ML RP Monocle finns också i -8 och -9.

Handtaget är gjort av metall.

