



TILPASSING AV BEECHER MIRAGE KIKKERTBRILLE


Følg disse 6 punktene:

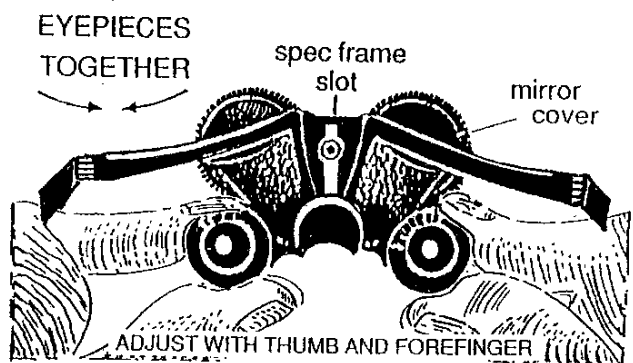

1. Mål PD og bruk deretter en linjal til å justere pupillavstanden på kikkerten. Justeringen gjør at brukeren skal se ett rundt bilde ved å se gjennom begge okularene samtidig.
2. Bruk så umbraconøkkelen til å løsne festeskruen som sitter i sporet på innfatningen mellom de to kikkertene. Skyv kikkerten opp til den hviler mot innfatningen. Fest skruen. Denne justeringen retter den binokulære kikkerten horisontalt og stabiliserer den.
3. Sett kikkerten på brukeren og reguler hodestroppen slik at kikkerten sitter godt på nesens. Observer den vertikale høyden.
4. For korrekt vertikal høyde, plasser nesestykket i et av de 4 sporene i innfatningen.
5. Justér neseputen. Riktig avstand mellom øyet og okularlinsen er 10 mm.
6. Still fokus for ønsket avstand ved å tilpasse hver objektivlinse individuelt som følger:
Med venstre øye lukket, skru den taggete ringen på det høyre objektiv til høyre og venstre til objektet er klart for høyre øye. Lukk så høyre øye og skru det venstre objektiv for å fokusere høyre øye. Ved å se med begge øyne skal brukeren nå se et optimalt bilde.

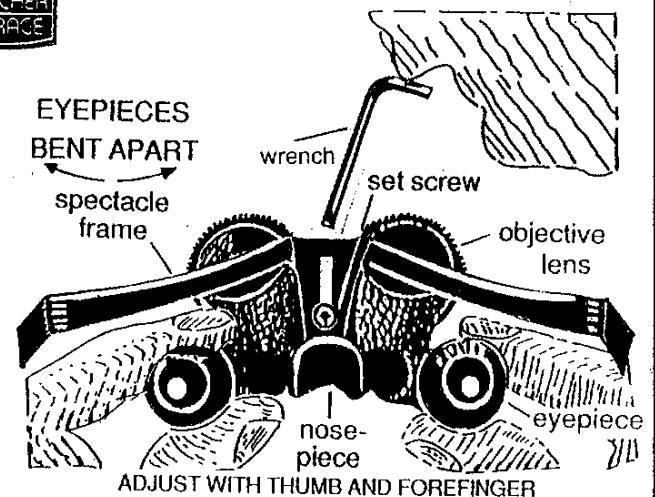

INSERTING THE NOSE BRACKET

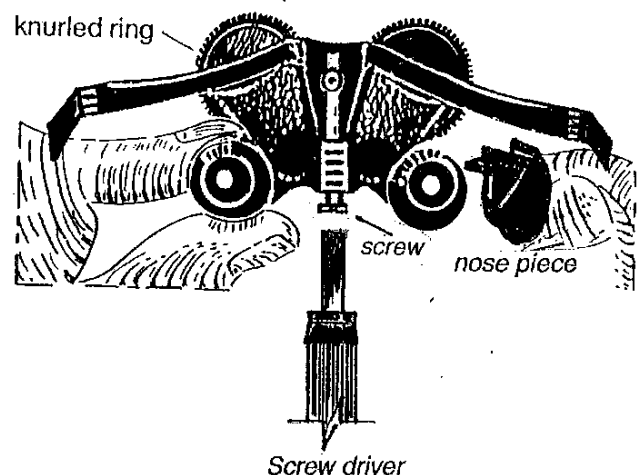

VIKTIG FOR TILPASSER

Husk å løsne festeskruen på innfatningen før tilpassing av pupillavstanden til ny bruker.

For pasienter som bruker hodestropp

For justering av størrelsen trekk stroppen ut eller inn av stangen.

RENHOLD AV KIKKERTBRILLEN

Fukt en ren klut med linsrens eller glassrens. Gni på hver linse med sirkulære bevegelser og polér tørt.

Senk aldri kikkerten ned i vann eller hold den under rennende vann.